

S -IgE-Pse (1722)

Indikaatiot Atooppisen allergian perusseulonta- ja erittelytutkimus, joka sisältää IgE-vasta-ainemäärityn pölyryhmälle (7154 S -PölyEr)- ja ruokaryhmälle (7172 S -Ruok5Er). Mikäli toinen tai molemmat ovat positiiviset, tehdään erittely spesifisillä allergeenitutkimuksilla automaattisesti.

Näyte 2 ml seerumia.

Lasten näytteille minimi seerumimäärä 900 μ l/l

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jäääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetyks huoneenlämässä.

Menetelmä Immunofluorometrinen.

Toimitusaika 1-3 työpäivää

Viitearvot Seulontatutkimukset: Negatiivinen alle 0.35 kU/l

[b]Tulkinta[/b]:

[u]Pitoisuus[/u]	[u]Allergialuokka[/u]	[u]Oiretulkinta[/u]
alle 0.35 kU/l	0	Normaali tulos. Herkistyminen epätodennäköinen. Ei sulje pois allergiaa.
0.35 - 0.69 kU/l	1	Harvoilla.
0.70 - 3.49 kU/l	2	Monilla.
3.50 - 17.4 kU/l	3	Useimmilla.
17.5 - 49.9 kU/l	4	Useimmilla.
50 - 100 kU/l	5	Useimmilla.
yli 100 kU/l	6	Useimmilla. Herkistyminen on sitä ilmeisempi, mitä korkeampi on IgE-pitoisuus.

Kommentti Pölyryhmän (S -PölyEr) ollessa positiivinen, tehdään automaattisesti spesifiset IgE-määritykset seuraaville allergeeneille:

S -KisshiE, Kissan hilse (e1)
S -HevohiE, Hevosien hilse (e3)
S -KoirhiE, Koiran hilse (e5)
S -TimospE, Timotei (g6)
S -KoivspE, Koivun siitepöly (t3)
S -PujospE, Pujon siitepöly (w6)
S -CladHeE, Home *Cladosporium herbarum* (m2)
S -DPteroE, Kotipölypunktki *Dermatophagoides pteronyssinus* (d1)

Ruokaryhmällä (S -Ruok5Er) saadun testituloksen ollessa positiivinen, tehdään automaattisesti spesifiset IgE-määritykset tavallisimmille ruoaineallergeeneille:

S -MunavaE, Munanvalkuainen (f1)
S -MaitoE, Maito (f2)
S -TurskaE, Kala (Turska, f3)
S -VehnäE, Vehnäjauho (f4)
S -MaapähE, Maapähkinä (f13)
S -SoijapE, Soija (f14)