

F -hHb-O (3813)

Indikaatiot Epäily suolistokanavan verenvuodosta.

Näyte Ulostetta Actim-näytelaimennosliuoksessa (Ulosteen veri näytepurkki (actim)).
Näytettä ei tule ottaa kuukautisten, vuotavien peräpukamien, virtsatieinfektion tai verenvuotoa aiheuttavan ummetuksen aikana. Näyte voidaan ottaa heti, kun verenvuotoa ei enää esiinny.

1. Aukaise Actim-näytteenlaimennospurkki ja ota näytettä korkkiin kiinnitetyllä tikulla. Pyöritä tikkua ulostenäytteen eri kohdissa siten, että tikun päässä olevat kaksi lovea täyttyvät.

2. Poista ylimääräinen uloste esim. pyyhkimällä tikkua wc-paperilla. Näytteen määrä on riittävä silloin, kun molemmat lovet sisältävät ulostetta.

Älä ota liian isoa näytettä, sillä liian suuri ulostemäärä haittaa testin suoritusta..

3. Siirrä näyte purkkiin ja kierrä tulppa kiinni. Ravista purkkia, jotta näyte sekoittuisi laimentimeen.

4. Toimita purkki laboratorioon testattavaksi. Näyte pitää testata viikon kuluessa sen ottamisesta. Näytesuspensiopurkkia voi säilyttää jääkaapissa tai huoneenlämmössä.

Huom! Näytteellä tulee olla oma tutkimuspyyntö omalla tunnisteella.

Säilytys ja lähetys Näytteet säilyvät 7 vrk jääkaapissa tai huoneenlämmössä. Lähetys huoneenlämmössä.

Näytteenotto-ohjeet ja -purkit voi tilata numerosta 045 77349060.

Menetelmä Immunokromatografinen.

Toimitusaika 1-2 työpäivää

Tulkinta Normaalisti ulosteessa ei ole verta (< 50 ug/g). Koska suolistovuoto on usein jaksottaista, negatiivinen löydös olisi syytä varmistaa tutkimalla vähintään 3 näytettä muutaman päivän välein. Koe ei vaadi erityistä ruokavaliota, sillä testi on spesifinen ihmisen hemoglobiinille. Menetelmän herkkyysraja on 50 ug/l hemoglobiinia ulostesuspensiossa, mikä vastaa 25-50 ug hemoglobiinia/ lg ulostetta.

Konsultointi Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi