

## P -Alb (4586), S -Alb (1028)

**Indikaatiot** Nestetasapainon seurantaan, maksan ja munuaisten tilan sekä ravitsemustilan arviointiin.

**Näyte** 0.5 ml seerumia tai hepariiniplasmaa.  
Lasten sormenpääverinäytteissä riittää 200 µl seerumia tai Li-hepariiniplasmaa. Samasta näytemäärästä voidaan tehdä myös muita peruskemian tutkimuksia.  
Tarvittaessa konsultoi asiantuntijoita.

Myös EDTA-plasma soveltuu.

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 5 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** Bromkresolipurppura.

Uusi menetelmä otettu käyttöön 23.11.2020.

**Toimitusaika** 1 työpäivä

<b>Viitearvot</b>	Aikuiset, 18-39 v	36-48 g/l
	40-69 v	36-45 g/l
	yli 70 v	34-45 g/l
Lapset,	alle 5 vrk	28-44 g/l
	5 vrk-13 v	37-51 g/l
Tytöt,	14-17 v	35-46 g/l
Pojat,	14-17 v	36-48 g/l

**Kommentti** Tuotanto Rochen menetelmällä aloitettu 23.11.2020  
Tulostaso pienillä alle 30 g/L pitoisuuksilla n. 10-15 % aiempaa matalampi.

**Konsultointi** Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius  
Puh.040 922 5301  
mikko.helenius@vita.fi