

S -HAVAb (3346)

Indikaatiot Aiemmin sairastetun A-hepatiitin osoittaminen (= perusimmunitetin osoittaminen ko. virukselle), immuniteetin tutkiminen rokotuksen ja gammaglobuliiniprofylaksian yhteydessä.

Näyte 1 ml seerumia

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy 14 vrk jääkaappilämpötilassa ja 6 vrk huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Elektrokemiluminometrinen (ECLIA)

Toimitusaika 1 työpäivä

Viitearvot Negatiivinen

Menetelmämuutos 8.1.2020.

Tulkinta Negatiivinen tulos merkitsee sitä, että potilas ei ole sairastanut hepatiitti A-infektiota ja tarvitsee gammaglobuliiniprofylaksiaa tai hepatiitti A-rokotesarjan matkustaessaan endeemisille alueille.

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi