

S -HCVAb (3815), S -HCVAbCt (1749)

Indikaatiot Tuoreen tai aiemmin sairastetun C-hepatiitin osoittaminen.

Näyte 1 ml seerumia, lapset vähintään 0.5 ml

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy 14 vrk jääkaappilämpötilassa ja 7 vrk huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Elektrokemiluminometrinen (ECLIA). Positiivinen tulos varmistetaan immunoblot-menetelmällä (S -HCVAbCt, KL 1749). Varmistus laskutetaan erikseen.

Toimitusaika 1 työpäivä. Varmistusanalyysi vie n. 5 työpäivää.

Viitearvot Negatiivinen

Menetelmämuutos 8.1.2020.

Tulkinta Serokonversio HCV-infektiossa tapahtuu useimmiten vasta 3-4 kuukauden kuluttua sairastumisesta. Vasta-aineiden tutkiminen on näin ollen akuutin C-hepatiitin diagnostiikassa vain rajallisesti sovelias. S -HCVAb ei kerro taudin aktiivisuudesta. Mikäli halutaan arvioida taudin aktiivisuutta, suositellaan RNA-tutkimusta (S -HCVNho tai S -HCVNh).

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi