

TS-AA-O (4035)**Indikaatiot** Yleistyneen amyloidoosin diagnostiikka.**Näyte** Ihonalaisen rasvan aspiraatiolla otettu materiaali tyhjennetään ruiskusta pintavarauskäsitellylle (esim. Superfrost plus) objektilasille. Lasilla oleva näyte hierretään toisella objektilasilla mahdollisimman tasaiseksi kerrokseksi. Lasien annetaan kuivua erillään n. 20 min. Kumpikin lasi voidaan lähettää näytteeksi.**Säilytys ja lähetys** Laseihin kirjataan potilaan henkilötiedot. Lasit pakataan huolellisesti ja lähetetään laboratorioon. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** kongopunavärjäys.**Tulkinta** Patologian erikoislääkäri antaa lausunnon, johon sisältyy SNOMED-järjestelmän mukainen diagnoosi.**Konsultointi** Patologian laboratorio
puh. 09 228800