

**U -Methipp (3229)**

Kertavirtsatutkimuksen yhteydessä pyydetävä myös U -Suhti (12579).

**Indikaatiot** Altiste: ksyleeni

**Näyte** 2 x 10 ml kertavirtsaa.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki. Iltanäyte, joka otetaan heti työvuoron päätyttyä. Näytteet otetaan tehdaspuhtaaseen kertakäyttöiseen muoviastiaan ja siirretään kaatamalla virtsaa **kahteen** 10 ml lisäaineettomaan putkeen. Erikoisastiaa tai putkea ei tarvita.

Kts. [Hivenaine- ja altistustutkimusten näytteenottovälineet](#)

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 3-4 päivää jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

**Menetelmä** HPLC

**Toimitusaika** 5-7 työpäivää

**Viitearvot** Altistumattomien viiteraja: isomeerien summa 0.5 mmol/l  
Toimenpideraja: isomeerien summa 5 mmol/l

Toimenpideraja on sosiaali- ja terveysministeriön asettama (STM Asetus 654/2020).

Orgaanisten liuottimien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten ksyleenialtistumisessa sovelletaan raskauden aikana toimenpiderajan arvoa 0.7 mmol/l.