

S -Levodopa (9069)

Indikaatiot Parkinsonin taudin lääkehoidon seuranta.

Näyte 2 ml seerumia. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen ja pakastetaan välittömästi.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Näyte pakastetaan välittömästi näytteenoton jälkeen ja lähetetään laboratorioon pakastekuljetuksena.

Menetelmä LC-MS

Toimitusaika 5-8 työpäivää

Viitearvot 0.2-2.5 mg/l

Alihankinta Kyllä.

Konsultointi

Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi