

S

Näytteestä tehdään seulonta-analyysi ja mahdolliset positiiviset löydökset kvantitoidaan. Vastauksessa ilmoitetaan todetut yhdisteet ja niiden pitoisuudet. Mahdolliset pitoisuusmääritykset laskutetaan erikseen.

Näyte 3 ml seerumia

Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä LC/MS

Toimitusaika 9 työpäivää

Tulkinta Rauhoittavat lääkkeet ja unilääkkeet:

-Bentsodiatsepiinit: mm. diatsepaami, nordiatsepaami, tematsepaami, oksatsepaami, klooridatsepoksidi, alpratsolaami, klonatsepaami, flunitratsepaami, loratsepaami, midatsolaami, nitratsepaami, triatsolaami, flunitratsepaami, fenatsepaami

- Unilääkkeinä käytettävät nk. z-lääkkeet: tsopikloni, tsolpideemi ja tsaleploni

Masennuslääkkeet:

- Trisykliset antidepressantit (amitriptyliini, klomipramiini, desipramiini, doksepiini, imipramiini, maprotiliini, mianseriini, nortriptyliini ja trimipramiini)

-mm. sitalopraami, mirtatsapiini, venlafaksiini

Neuroleptit:

-mm. ketiapiini, klotsapiini, olantsapiini, levomepromatsiini

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi

Kemisti, FT Riia Plihtari

Puh. 045 7734 9026

riia.plihtari@vita.fi