

B -Mn (3748)

Indikaatiot Mangaanialtistuksen seuraaminen.

Näyte Kokoverinäyte 2 ml. Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki. Näyte otetaan hepariinihivenaineputkeen (esim. Vacuette 456080). Kokoverinäyte sekoitetaan hyvin hyytymisen estämiseksi. Näyte otetaan työvuoron päätyttyä.

Huom! Näyte on kontaminaatioherkkä. Työvaatteet vaihdetaan ennen näytteenottoa.

Kts. [Hivenaine- ja altistustutkimusten näytteenottovälineet](#)

Säilytys ja lähetys Säilytys jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä ICP-MS

Toimitusaika 4 - 8 työpäivää

Viitearvot 91-246 nmol/l

Altistumattomien viiteraja 273 nmol/l

Alihankinta Kyllä.