

**S-Perats (9094)****Indikaatiot** Perklooriperatsiinihoidon seuranta. (Peratsin-lääkehoidon seuranta kts. [3099](#))**Näyte** 2 ml seerumia.

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** LC/MS**Toimitusaika** 5 työpäivää**Viitearvot** Terapeuttinen alue: 59-295 nmol/l**Alihankinta** Kyllä.**Konsultointi**

Kemisti, FT Riia Plihtari

Puh. 045 7734 9026

riia.plihtari@vita.fi