

**S -Flura (12011)**

**Indikaatiot** Fluratsepaamihoidon seuranta tai äskettäisen käytön toteaminen

**Näyte** 3 ml seerumia.

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** LC-MS/MS

**Toimitusaika** 3 työpäivää.

**Viitearvot** Terapeuttinen alue 2.6 - 72.2 nmol/l  
Toksinen yli 515 nmol/l

**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen

**Konsultointi**

Kemisti, FT Riia Plihtari

Puh. 045 7734 9026

riia.plihtari@vita.fi