

## S -Bromatsepaami

**Indikaatiot** Bromatsepaamihoidon seuranta tai äskettäisen käytön toteaminen.

**Näyte** 3 ml seerumia.

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** LC-MS/MS

**Toimitusaika** 3 työpäivää

**Viitearvot** viitealue: 130-280 nmol/l  
toksinen pitoisuus: 650 nmol/l

**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen

### Konsultointi

Kemisti, FT Riia Plihtari  
Puh. 045 7734 9026  
riia.plihtari@vita.fi