

S -DS5 (12026)**Tutkimuspaketti sisältää seuraavat analyysit:**

- Amfetamiini(S -Amfet-O, KL 2999)
- Bentsodiatsepiinit (S -Bendi-O, KL 3672)
- Kannabis (S -Canna-O)
- Opiaatit (S -Opiaa-O)
- Kokaiini (S -Koka-O)

Indikaatiot Äskettäisen huumeidenkäytön selvittely.

Näyte 3 ml seerumia (eroteltu)

Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Voidaan tarvittaessa tehdä myös kokoverestä. Ensisijainen näytemateriaali on kuitenkin seerumi.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Huumeseulonta: Entsyymi-immunologinen
Varmistukset: LC-MS/MS

Akkreditoidut menetelmät.

Positiiviset seulontatulokset varmistetaan massaspektrometrisesti akkreditoidussa alihankintalaboratoriossa. Varmistustuloksen perusteella Vitassa laaditaan lausunto.

Toimitusaika 1-2 työpäivää. Varmistustutkimus 3-5 työpäivää.

Tulkinta Seulontatutkimus on immunologinen, joten ristireaktio esim. tiettyjen lääkeaineiden kanssa on mahdollinen. Tämän vuoksi positiivinen seulontatuloks on aina varmistettava. Varmistustutkimukset laskutetaan erikseen.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi

Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi

LL, MRO, Jukka Hurme
p. 045 7734 9010
jukka.hurme@vita.fi