

## F -Para-O (2455)

Katso myös F -ParaNhO (6375).

**Indikaatiot** Parasiitti-infektioepäily vatsavaivojen tai eosinofilian selvittelyssä.

**Näyte** Parasiittien erittyminen ulosteeseen on ajoittaista, joten infektion poissulkemiseksi suositellaan otettavaksi useampia näytteitä parin päivän välein. On suositeltavaa ottaa 3 näytettä 1-3 päivän välein (näytteet voi lähettää samalla kerralla).

**Kiinteä uloste:** ulosteesta otetaan puutikulla noin peukalonpään kokoinen nokare sekä ulosteen pinnalta että sisältä suhteessa 1 osa ulostetta ja 5 osaa formaliinia (1+5).

**Ripuliuloste:** ulostetta otetaan formaliinipurkkiin suhteessa 1 osa ulostetta ja 1 osa formaliinia (1+1). Näyte homogenisoidaan ravistelemalla purkkia voimakkaasti. Purkki suljetaan huolellisesti ja laitetaan muovipussiin. Mahdolliset ulkomaanmatkat ja oireet ilmoitetaan laboratorioon.

On tärkeää, että ulostenäyte **fiksoidaan huolellisesti** heti näytteenoton jälkeen 10%:een formaliiniliuokseen (ulosteen parasiittinäytepurkki).

**Huom! Näytteillä tulee olla oma tutkimuspyyntö omalla tunnisteella.**

**Säilytys ja lähetys** Säilytys jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Ei saa jäättyä.

**Menetelmä** Mikroskopointi formaliini-etyyliasettaatti-konsentroinnin jälkeen.

**Toimitusaika** Tavanomainen vastausaika 5-7 työpäivää. Näytteen mahdolliset lisätutkimukset voivat pidentää tavanomaista vastausaikaa.

**Tulkinta** Normaali tulos on negatiivinen. Parasiitit erittyvät usein jaksoittain, joten yhdestä näytteestä saatu negatiivinen tulos voi olla harhaanjohtava. Parasiittinäytteitä on tämän vuoksi suositeltavaa ottaa 3 näytettä 1-3 päivän välein (näytteet voi lähettää samalla kerralla).

**Konsultointi** Mikrobiologian laboratorio  
Puh. 045 7734 9039

Mikrobiologi Taru Meri  
puh. 044 0185731  
taru.meri@vita.fi