

**-ChpnNhO (4384)****Indikaatiot** *Chlamydia pneumoniae* infektion epäily**Näyte** Takanielusta otettu tikkunäyte, nenänielun imulimanäyte, yskös, koepalat ja nestemäiset (BAL, nivelneste, likvori) näytteet.Ylähengitysteistä tikkunäyte otetaan takanielusta (esim . nenän kautta).  
Näytetikka katkaistaan kuivaan putkeen tai viruskuljetusputkeen.Koepalat ja nestemäiset näytteet lähetetään sellaisenaan tehdaspuhtaassa,  
kierrekorkillisessa muoviputkessa.Näytteet toimitetaan laboratorioon mahdollisimman pian, mieluiten  
viilennettynä. Väliaikainen säilytys jääkaappilämpötilassa. Pidempi säilytys  
(>3vrk) pakastettuna, jonka jälkeen näyte on myös lähetettävä pakastettuna.**Menetelmä** Nukleiinihapon osoitus**Toimitusaika** 3-10**Viitearvot** Negatiivinen**Tulkinta** Positiivinen tulos on diagnostinen.  
Negatiivinen tulos ei poissulje mahdollista infektiota.**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen**Konsultointi** Mikrobiologi, Taru Meri  
Puh. 044 0185731  
taru.meri@vita.fi