

U -Mukon (1769)

Kertavirtsatutkimuksen yhteydessä analysoimme myös U -Suhti (12579).

Indikaatiot Bentseenialtistus

Näyte 2 x 10 ml kertavirtsa. Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Iltanäyte. Näyte otetaan altistavan työvaiheen tai työvuoron päätyttyä. Näyte otetaan tehdaspuhtaaseen kertakäyttöiseen astiaan ja siirretään kaatamalla virtsaa **kahteen** 10 m lisääineettomaan virtsanäyteputkeen.

Kts. [Hivenaine- ja altistustutkimusten näytteenottovälineet](#)

Säilytys ja lähetys Säilytys kylmässä, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä HPLC

Viitearvot Altistumattomat: alle 2 µmol/l
Toimenpideraja: 14 µmol/l

Tulkinta Tupakointi saattaa jonkin verran nostaa virtsan mukonihapon pitoisuutta.