

U -Kemseul (1881)

Sisältö:

Liuskakoe, joka sisältää ainoastaan kemiallisen seulonnan (pH, Gluk, Leuk, Nitr, Alb, Keto ja Eryt), positiivinen seulontatulokset ei johda jatkotutkimuksiin.

Indikaatiot Päivystysdiagnostiikka, infektioepäily, jossa ei tarvita viljelyä, mutta diagnoosi halutaan varmistaa. Komplisoitumattomat naisten akuutit alempien virtsateiden infektiot avohoidossa.

Näyte 10 ml puhtaasti laskettua keskisuihkuvirtsaa lisäaineettomaan virtsaputkeen.

Huom! Mikäli näyteputkena on käytetty säilöntäaineellista virtsanäyteputkea, U-pH tutkimus ei sisälly kemialliseen seulontaan.

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy kemiallista seulontaa varten jääkaappilämpötilassa 24 tuntia (näyte on viilennettävä välittömästi) ja huoneenlämmössä 8 tuntia. Huoneenlämpötilassa säilytetty näyte on toimitettava laboratorioon 6 tunnin kuluessa näytteenotosta.

Menetelmä Liuskakoe.

Toimitusaika Työpäivinä.

| | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------|
| Viitearvot | pH | 5-7 |
| | Leukosyytit | negatiivinen |
| | Nitriitti | negatiivinen |
| | Proteiini (Albumiini) | negatiivinen |
| | Erytrosyytit (Hemoglobiini) | negatiivinen |
| | Glukoosi | negatiivinen |
| | Ketoaineet | negatiivinen |