

S -Bendi (1177)

Indikaatiot Bentsodiatsepiinien käytön toteamiseen tai lääkeainemyrkytyksen selvittämiseen.

Näyte 3 ml seerumia.

Näyte otettava aamulla ennen lääkkeen ottoa. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Nestekromatografi-massaspektrometrinen

Toimitusaika 3-5 työpäivää

Tulkinta Vastauksessa ilmoitetaan löytyneet yhdisteet ja niiden pitoisuudet.

Menetelmä mittaa alpratsolaamia, diatsepaamia, nordiatsepaamia, flunitratsepaamia, klobatsaamia, estatsolaamia, klonatsepaamia, klooridiatsepoksidia, midatsolaamia, loratsepaamia, nitratsepaamia, lormetatsepaamia, oksatsepaamia, tematsepaamia, bromatsepaamia, fenatsepaamia, tetratsepaamia, fluratsepaamia ja triatsolaamia.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi

Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi