

S -Gen (1450)

Indikaatiot Gentamysiinihoidon seuranta.

Näyte 1 ml seerumia, lapset vähintään 0.5 ml.

Minimipitoisuuden määrittämistä varten näyte otetaan ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy jääkaapissa viikon, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Entsyymi-immunologinen menetelmä (CEDIA)

Toimitusaika 3 työpäivää

Viitearvot Minimipitoisuus: 0.5- 2.0 mg/l

Huippupitoisuus: 6 - 10 mg/l

Toksinen: yli 10 mg/l

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi

Kemisti, FT Riia Plihtari

Puh. 045 7734 9026

riia.plihtari@vita.fi