

S -ANA-Ty (4505)

Tutkimus sisältää seuraavat osatutkimukset:

12103 S -SmAbBl, Sm (Smith), vasta-aineet
12101 S -RNPAAbBl, Ribonukleoproteiini, nukleaarinen, vasta-aineet
12104 S -SSAABBl, Sjögrenin syndrooma A (Ro)-vasta-aineet
12105 S -SSBAbBl, Sjögrenin syndrooma B (La)-vasta-aineet
12108 S -SentBAbBl, sentromeeri(CENP-B), vasta-aineet
12106 S -Scl70AbBl, Skleroderma 70, vasta-aineet
12107 S -JolAbBl, Jo-1, vasta-aineet
12109 S -HistAbBl, Histoni, vasta-aineet
12102 S -rRNPAAbBl, P-proteiini, ribosomaalinen, vasta-aineet

Indikaatiot Systemisten autoimmuunitautien kuten systeemisen lupus erytematosuksen, Sjögrenin oireyhtymä, sekasidekudostaudin (MCTD), toistuvien keskenmenojen ja neonataalilupuksen diagnostiikka.

Näyte 1 ml seerumia

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Immunoblottaus, jossa voidaan nähdä vasta-aineet seuraaville tuma-antigeeneille: Sm (SmB, SmD), RNP (RNP-A, -C, -70k), SS-A (Ro52, Ro60), SS-B (La), sentromeeri (Cenp-B), Scl-70/Topo I, Jo-1, ribosomaalinen RNP (ribosomin P-proteiinit) ja histonit (H1, H2A, H2B, H3, H4).

Toimitusaika 4-9 työpäivää

Viitearvot Negatiivinen. Positiivisesta tuloksesta annetaan lausunto.

Tulkinta Ks myös Tuma, liukoiset antigeenit, vasta-aineet laaja tutkimus (S -ENAAAbL)
Sisältyy tutkimukseen Tuma, vasta-aineet, analyysi (S -ANAAAb-A).

Alihankinta Kyllä.