

S -Tiopen (3117)

Näyte Näyte otetaan hoitavan lääkärin ohjeiden mukaisesti.
2 ml seerumia. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.
Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Kaasukromatografinen

Toimitusaika 10 työpäivää

Viitearvot Terapeuttinen alue 1.0 - 5.0 mg/l. Toksisena pidetään yli 10 mg/l pitoisuuksi a.

Tulkinta Lääkäri tulkitsee tuloksen ottaen huomioon potilaan lääkityksen ja kliinisen tilan sekä näytteenottoajankohdan.

Alihankinta Kyllä.

Konsultointi

Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi