

S -Bupre (4733)

Vitassa näytteelle lisätään tutkimus 12268 S-Norbupre

Indikaatiot Buprenorfiinihoidon seuranta.

Näyte 1 ml seerumia. Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nautttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Nestekromatografi-massaspektrometrinen

Toimitusaika 5 työpäivää

Tulkinta Vastauksessa ilmoitetaan sekä buprenorfiinin että sen aineenvaihduntatuotteen norbuprenorfiinin pitoisuudet.
Vastaukset ilmoitetaan yksikössä µg/l (= ng/ml).

Yksikkömuutos 6.3.2015.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi

Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi