

**U -Amfet-O (1055)**

**Indikaatiot** Amfetamiinin ja sen johdannaisten väärinkäytön selvittämiseen. [Ks. myös Huumeseulonnat](#)

**Näyte** 10 ml virtsaa, säilöntäaineeton putki.

**Säilytys ja lähetys** Näyte säilyy noin 3 viikkoa jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Huumausaineanalyysipyyntöissä täytetään erillinen huumelähete. Lähetys huoneenlämmössä. Läheteeseen merkitään potilaan lääkitys.

**Menetelmä** Entsyymi-immunologinen

**Toimitusaika** 1 työpäivä

**Viitearvot** Negatiivinen

**Tulkinta** Menetelmä soveltuu amfetamiinin, metamfetamiinin, metyleenidioksiamfetamiinin (MDA), metyleenidioksimetamfetamiinin (MDMA, Ekstaasi) ja metyleenidioksietyyliamfetamiinin (MDEA) väärinkäytön selvittämiseen.

Positiivisen seulontatuloksen alarajana pidetään 500 ng/ml. Positiivinen seulontatulokset varmistetaan aina massaspektrometrillä menetelmällä, josta laskutetaan erikseen. Varmistustutkimus [U-AmfetCt](#) sisältää laajemmin erilaisia psykostimulantteja ja se voidaan pyytää haluttaessa erikseen.

**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari  
Puh. 045 7734 9026  
riia.plihtari@vita.fi

LL Jukka Hurme  
Puh. 045 7734 9010  
jukka.hurme@vita.fi