

U -Opiaa-O (2435)**Indikaatiot** Opiaattien käytön selvittämiseen. [Ks. myös Huumeseulonnat](#)**Näyte** 10 ml virtsaa, säilöntäaineeton putki.**Säilytys ja lähetys** Näyte säilyy noin 3 viikkoa jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Huumausaineanalyysipyynnöissä täytetään erillinen huumelähete. Lähetys huoneenlämmössä. Lähetteeseen merkitään potilaan lääkitys.**Menetelmä** Entsyymi-immunologinen**Toimitusaika** 1 työpäivä**Viitearvot** Negatiivinen**Tulkinta** Menetelmä soveltuu ensisijaisesti heroiinin, kodeiinin ja morfiinin väärinkäytön selvittämiseen.

Positiivisen seulontatuloksen alarajana pidetään 300 ng/ml. Positiivinen seulontatulokset varmistetaan aina massaspektrometrillä menetelmällä, josta laskutetaan erikseen. Varmistustutkimus [U-OpiaaCt](#) ja laajempi U-OpioidCt sisältävät laajemmin erilaisia opioideja ja ne voidaan pyytää haluttaessa erikseen.

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi