

U -Koka-O (4128)**Indikaatiot** Kokaiinin käytön selvittäminen [Ks. myös Huumeseuonnat](#)**Näyte** 10 ml virtsaa, säilöntäaineeton putki.**Säilytys ja lähetys** Näyte säilyy noin 3 viikkoa jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Huumausaineanalyysipyynnöissä täytetään erillinen huumelähete. Lähetys huoneenlämmössä. Läheteeseen merkitään potilaan lääkitys.**Menetelmä** Entsyymi-immunologinen**Toimitusaika** 1 työpäivä**Viitearvot** Negatiivinen**Tulkinta** Menetelmä määrittää kokaiinin aineenvaihduntatuotetta bentsoyyliekgoniinia.

Positiivisen seulontatuloksen alarajana pidetään 150 ng/ml. Positiivinen seulontatulos varmistetaan aina massaspektrometrillä menetelmällä, josta laskutetaan erikseen [U-KokaCt](#).

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi