

S -Nipam (2398)**Indikaatiot** Nitratsepaamihoidon seurantaan.**Näyte** 3 ml seerumia.

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** HPLC/MS/MS**Toimitusaika** 3 - 5 työpäivää**Viitearvot** Terapeuttinen alue: 110 - 430 nmol/l
Toksinen yli 700 nmol/l

Yksikkömuunnoskertoimet:

nmol/l = µg/l x 3.56

nmol/l = mg/l x 3560

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen**Konsultointi**

Kemisti, FT Riia Plihtari

Puh. 045 7734 9026

riia.plihtari@vita.fi