

S -Fluvoks (1851)**Indikaatiot** Fluvoksamiinihoidon seuranta**Näyte** 3 ml seerumia.

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Nestekromatografinen (HPLC)**Toimitusaika** 3 - 5 työpäivää**Viitearvot** Terapeuttinen alue: 180 - 700 nmol/l (60 - 230 µg/l)

Toksinen pitoisuus: yli 1550 nmol/l

Alihankinta Kyllä.**Konsultointi**

Kemisti, FT Riia Plihtari

Puh. 045 7734 9026

riia.plihtari@vita.fi