

S -Moklob (1896)**Indikaatiot** Moklobemidihoidon seuranta**Näyte** 3 ml seerumia.

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. Lähetteeseen merkitään potilaan muu lääkitys.**Menetelmä** HPLC/MS/MS**Toimitusaika** 6 työpäivää**Viitearvot** Moklobemidille ei ole määritelty tarkkaa terapeuttista aluetta. Moklobemidiho idossa seerumipitoisuudet ovat yleensä 0.2 - 2.0 µmol/l.**Alihankinta** Kyllä.**Konsultointi**

Kemisti, FT Riia Plihtari

Puh. 045 7734 9026

riia.plihtari@vita.fi