

B -Hb-CO (1566)

Indikaatiot Altiste: Häkä (hiilimonoksidi), metyleenikloridi (dikloorimetaani), metyleenijodidi

Näyte 5-10 ml kokoverta geelittömään hepariiniputkeen. Näyte sekoitetaan huolellisesti hyytymisen estämiseksi.

Näyte otetaan välittömästi altistumisen päätyttyä. Luotettava mittaus edellyttää 10 tunnin tupakoimattomuutta ennen näytteenottoa.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä.

Viitearvot Altistumattomien viiteraja 0.015 (= 1.5 %)
Toimenpideraja 0.040 (= 4.0 %)

Toimenpideraja on sosiaali- ja terveysministeriön asettama. (STM Asetus 654/2020)

Tekopaikka Työterveyslaitos