

B -EtOH (1378)

Indikaatiot Etanolin kvantitatiivinen määrittäminen oikeuslääketieteellisiin tarkoituksiin kahdella head space-kaasukromatografisella menetelmällä.

Näyte Putkellinen kokoversta (NaF tai EDTA). Ei geeliputki. Putkea ei saa avata näytteenoton jälkeen. Ihoa ei saa puhdistaa alkoholipitoisella desinfektioaineella.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Näyte suositellaan otettavaksi fluoridiputkeen mikrobikasvun välttämiseksi, mikäli näytettä joudutaan säilyttämään pidempään ennen laboratorioon lähettämistä.

EDTA-näyte tulee lähettää mahdollisimman nopeasti laboratorioon. Säilytys 3-4 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä, mikäli perillä seuraavana päivänä. Muutoin kylmäkuljetus.

Menetelmä head space-kaasukromatografia (kaksi eri menetelmää). Tulos ilmoitetaan neljän määrittäksen keskiarvona.

Toimitusaika 5 työpäivää

Viitearvot alle 0.10 promillea

Tekopaikka Labor Dr. Karmer & Kollegen

Konsultointi

Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi