

Sy-Co (12256)**Indikaatiot** Tekonivelpotilaiden biomonitorointi.**Näyte** 2 ml nivelnestettä. Näyte on kontaminaatioherkkä.

Näytteenotossa käytetty neula huuhdellaan ensin ottamalla noin 1 ml nivelnestettä ruiskuun. Tätä näytettä ei käytetä analyysiin. Vasta tämän jälkeen otetaan puhtaalla ruiskulla 2 ml nivelnestettä, joka siirretään hivenaineanalyysiin tarkoitettuun hepariiniputkeen (esim. Vacuette NH Trace Elements Sodium Heparin, 6 ml, 456080).

Kts. [Hivenaine- ja altistustutkimusten näytteenottovälineet](#)

Säilytys ja lähetys Säilytys 4-5 päivää jääkapissa. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** ICP-MS**Toimitusaika** 8-12 työpäivää.**Alihankinta** Kyllä.