

U -Naftol (3977)

U -Naftol (3977) on 1-Naftolin ja 2-Naftolin yhteenlaskettu pitoisuus

Sisältää osatutkimukset:

U -1-Naftol (12315)

U -2-Naftol (12316)

Indikaatiot Altistus polysyklisille aromaattisille hiilivedyille, PAH-seoksille (esim. kreosootti).

Näyte 10 ml virtsaa. Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Näyte otetaan altistavan työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Ennen näytteen antamista työntekijän tulee vaihtaa työvaatteet ja mahdollisuuksien mukaan käydä suihkussa kontaminaatoriskin takia. Ennen näytteenottoa tulee pestä kädet ja suorittaa alapesu.

Näyte otetaan tehdaspuhtaaseen kertakäyttöiseen astiaan, josta se siirretään lisäaineettomaan virtsanäyteputkeen.

Kts. [Hivenaine- ja altistustutkimusten näytteenottovälineet](#)

Säilytys ja lähetys Säilytys jääkaapissa lähettämiseen saakka. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä GC-MS

Toimitusaika 1-3 viikkoa.

Viitearvot Altistumattomien viiteraja:

1-Naftolin ja 2-Naftolin yhteenlaskettu pitoisuus alle 35 µg/l (kaikki, myös tupakoivat)

Tupakointi lisää virtsan naftolipitoisuutta.