

**U -Mn (2323)**

Kertavirtsatutkimuksen yhteydessä analysoimme myös U -Suhti (12579).

**Indikaatiot** Mangaanialtistuksen seuraaminen.

**Näyte** 2 x 10 ml kertavirtsaa.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Iltanäyte. Näyte otetaan altistumisjakson lopulla työvuoron päätyttyä, kun työvaatteet on vaihdettu ja kädet sekä virtsaputken suu on pesty. Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

Näyte otetaan tehdaspuhtaaseen kertakäyttöiseen muoviastiaan ja siirretään kaatamalla välittömästi virtsaa **kahteen** 10 ml hivenainevirtsanäyteputkeen 60.610.100).

Kts. [Hivenaine- ja altistustutkimusten näytteenottovälineet](#)

**Säilytys ja lähetys** Säilytys jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** AAS. Menetelmä on akkreditoitu tekopaikassa.

**Toimitusaika** 4-8 työpäivää

**Viitearvot** Altistumattomien viiteraja: 10 nmol/l  
Toimenpiderajaa ei ole asetettu.

**Alihankinta** Kyllä.