

**U -BendiCt (1820)**

**Indikaatiot** Kvalitatiivinen positiivisen bentsodiatsepiiniseulonta-analyysin varmistustutkimus.

**Näyte** 5 ml kertavirtsaa, säilöntäaineeton putki. Sama näyte, josta seulonta-analyysi on tehty.

**Säilytys ja lähetys** Näyte säilyy noin 3 viikkoa jääkaapissa, pidempiaikainen pakastetuna. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** LC-MS/MS

**Toimitusaika** 3-5 työpäivää

**Tulkinta** Kvalitatiivinen LC-MS/MS-menetelmä. Menetelmä määrittää spesifisesti diatsepaamia, oksatsepaamia, tematsepaamia, nordiatsepaamia, OH-alpratsolaamia, bromatsepaamia, 3-OH-bromatsepaamia, 7-amino-flunitratsepaamia, 7-amino-klonatsepaamia, loratsepaamia, OH-midatsolaamia, fluratsepaamia, OH-fluratsepaamia, nitratsepaamia, 7-amino-nitratsepaamia, lormetatsepaamia, fenatsepamia, OH-fenatsepaamia, OH-triatsepaamia, tetratsepaamia, klobatsaamia, norklobatsaamia, estatsolaamia, klooridiatsepoksidia, pratsepaamia, etitsolaamia, tsopiklonia, tsolpideemia, tsaleplonia, flubromatsolaamia, OH-flubromatsolaamia, diklatsepaamia ja pyratsolaamia. Positiivisesta näytteestä ilmoitetaan löytyneet yhdisteet.

**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen

**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari  
Puh. 045 7734 9026  
riia.plihtari@vita.fi

LL Jukka Hurme  
Puh. 045 7734 9010  
jukka.hurme@vita.fi