

fP-Laktaat (2184)

Näyte Potilaan tulee olla levossa ennen näytteenottoa vähintään 30 min. Varmimmin oikea tulos saadaan kahden tunnin levon jälkeen paastonäytteestä.

0.5 ml plasmaa (fluoridioksalaatti, BD REF 368920), lapset vähintään 0.2 ml. Näyte otetaan ilman staasia fluoridioksalaattiputkeen, sekoitetaan huolellisesti ja plasma erotetaan lisääineettomaan erotteluputkeen mahdollisimman pian, viimeistään 30 minuutin kuluessa näytteenotosta.

Säilytys ja lähetys Eroteltu näyte voidaan lähettää huoneenlämpöisenä, jos perillä samana päivänä. Muutoin kylmälähetys. Pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

Menetelmä Fotometrinen

Toimitusaika Kaksi työpäivää

Viitearvot 0.5 - 2.2 mmol/l

Tekopaikka HUSLAB