

-MygeNhO (6195)

Indikaatiot *Mycoplasma genitalium* -infektioepäily. Miesten ja naisten uretriitin sekä naisten servisiitin ja sisäsynnytintulehdusten etiologian selvitys.

Näyte Tikkunäyte (virtsaputki, cervix tai emätin) otetaan pumpuli- tai dacron-tikulla runsasta limaa välttämällä siten, että näytteeseen saadaan epiteelisoluja. Näytetikku voidaan lähettää kuivassa steriilissä tai tehdaspuhtaassa kierrekorkillisessa putkessa tai Copan eNat -putkessa. Miehiltä voidaan ottaa myös ensivirtsanäyte 2-5 tunnin rakkoajan jälkeen. Näytemäärä 5 ml säilöntäaineettomaan virtsankuljetusputkeen.

Säilytys ja lähetys Näytteiden säilytys jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämpötilassa. Kuivat tikkunäytteet on toimitettava laboratorioon 3 vrk kuluessa, virtsanäytteet 2 vrk kuluessa. Copan eNat -putkessa tikkunäytteet säilyvät tutkimuskelpoisina ainakin viikon ajan.

Toimitusaika 2-5 työpäivää

Viitearvot Normaalisti Negat.

Tulkinta Positiivinen tulos osoittaa näytteessä olevan *M. genitaliumin* nukleiinihappoa ja viittaa siten ko. bakteerin osallisuuteen infektion aiheuttajana.

Alihankinta Kyllä.

Konsultointi Mikrobiologi Taru Meri
puh. 044 018 5731
taru.meri@vita.fi