

**P -TT (1731)****Indikaatiot** Maksan toiminnan tai hyytymishäiriöiden tutkiminen**Näyte** 1 ml sitraattiplasmaa (3.2 % Na-sitraatti = 109 mM Na-sitraatti).

Näyte otetaan Na-sitraattiputkeen, sekoitetaan huolellisesti heti näytteenoton jälkeen. Näyte säilyy kokoverenä ja plasmana 24 h huoneenlämmössä. Jos näytettä ei voida lähettää vrk:n sisällä, plasma erotellaan ja pakastetaan. Pakastettu näyte lähetetään laboratorioon pakastettuna. Näytettä ei saa säilyttää jääkaappilämpötilassa.

Näyte ei saa olla hemolyyttinen. Näytteen hemolysoituminen voi olla merkki hyytymisjärjestelmän aktivoitumisesta ja johtaa virheellisen matalaan INR-arvoon.

**Säilytys ja lähetys** *Lähetys huoneenlämpöisenä, kylmältä suojattuna.***Menetelmä** Owrenin protrombiinikompleksi-periaate**Toimitusaika** 1 työpäivä**Viitearvot** Normaali 70 - 130 %**Kommentti** Oraalisen antikoagulanttihoidon seurannassa käytetään tutkimusta P -TT-INR (KL 4520).**Konsultointi** Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius  
Puh. 040 922 5301  
mikko.helenius@vita.fi