

Ts-PADendo (6389)

Kohdun limakalvon spesifinen tutkimusnimike.

Indikaatiot Nimike on tarkoitettu kohdun limakalvon tilan selvittelyyn. Se käsittää yleensä gynekologisen toimenpiteen yhteydessä otetut kohdun limakalvon kudosnäytteet, kuten imunäytteet, kaapeet, biopsiat, polyyppiresektiot ja vastaavat. - myös myometriumin höyläysmateriaali, jossa on sekä myometriumia että endometriumia kuuluu tähän nimikkeeseen. - fraktioidun kaavinnan sekä corpus että cervix-kaave kuuluvat tähän nimikkeeseen.

Näyte Kohdun limakalvon eritavoin otettu kudosnäyte.
Näyteastia: tavallinen formaliinipurkki (10% formaliinia; 4 % formaldehydiä).
Tilavuus vähintään 3x näytteen tilavuus.

Säilytys ja lähetys Kuljetetaan ja säilytetään huoneenlämmössä. Näyte siirretään fiksatiiviin mahdollisimman nopeasti.

Menetelmä Rutiini kudostekniikka: kudosprosessointi, parafiiniin valu, leikkaus, HE-värjäys, mikroskopointi ja tarvittaessa erikoisvärjäyksiä.

Toimitusaika Tehdään päivittäin. Viive 5 arkipäivää näytteen saapumisesta laboratorioon.

Tulkinta Patologin kirjallinen lausunto, joka sisältää lausunnon ja histologisen diagnoosin.

Luotettavan tulkin edellytys on edustava ja oikein fiksoitu näyte sekä hyvät lähetetiedot: kiertoanamneesi, käytetyt hormonihoitot, kliiniset oireet on mainittava. Kliininen työdiagnoosi on hyvä sisällyttää esitietoihin.

Virhelähteet:

Merkittävin virhelähde on näytteen niukkuus. Myös näytteen rutistumista/ruhjoutumista tulee myös välttää näytettä käsiteltäessä. Pahanlaatuisten kasvainten invaasioaste ja tarkempi tyyppitys voivat jäädä epävarmoiksi.

Konsultointi Patologian laboratorio: 09 228800 tai patologi@vita.fi ; Patologian ylilääkäri Tuula Kuukasjärvi 040 7655 165