

Ts- PADKolp (6388)

Biopsianäytteiden tutkimusnimike.

Indikaatiot Nimike on tarkoitettu kolposkopian yhteydessä otettujen biopsioiden histologiseen tutkimukseen. Tutkimuksen taustalla usein poikkeava PAPA / HPV - löydös. Biopsiat voivat olla vaginasta, portiolta, endocerviksistä. HUOM! varsinaiset konisaatioresekaatit (loop) eivät kuulu tähän nimikkeeseen, vaan ne on pyydyttävä PAD-4 tutkimuksena.

Näyte Kudosbiopsiat.
Näyteastia: tavallinen formaliinipurkki (10% formaliinia; 4 % formaldehydiä).
Tilavuus vähintään 3x näytteen tilavuus.

Säilytys ja lähetys Kuljetetaan ja säilytetään huoneenlämmössä. Näyte siirretään fiksatiiviin mahdollisimman nopeasti.

Menetelmä Rutini kudostekniikka: kudosprosessointi, parafiiniin valu, leikkaus, HE-värjäys, mikroskopointi ja tarvittaessa erikoisvärjäyksiä.

Toimitusaika Tehdään päivittäin. Viive 5 arkipäivää näytteen saapumisesta laboratorioon.

Tulkinta Patologin kirjallinen lausunto, joka sisältää lausunnon ja histologisen diagnoosin.

Luotettavan tulkin edellytys on edustava ja oikein fiksoitu näyte sekä hyvät lähetetiedot: biopsioiden ottokohdat, näytteenottoindikaatio, keskeiset kliiniset statuslöydökset skopiatutkimuksessa. Työdiagnoosi on hyvä mainita.

Virhelähteet:

Merkittävin virhelähde on näytteen pienen biopsian vaikea orientaatio. Irtoava pintaepiteeli vaikeuttaa tulkintaa olennaisesti (dysplasian asteen määrittäminen). Myös näytteen rutistumista/ruhjoutumista tulee myös välttää näytettä käsiteltäessä.

Konsultointi Patologian laboratorio: 09 228800 tai patologi@vita.fi ; Patologian ylilääkäri Tuula Kuukasjärvi 040 7655 165