

-MPoxNhO (13061)

Indikaatiot Kliininen epäily apinarokkoviruksesta. Rakkulainen ihottuma, matkustusanamneesi ja/tai kontakti sairastuneen kanssa.

Näyte Materiaalia kerätään rakkulan/rakkuloiden pohjalta nukkaamattomalla näytteenottotikulla (dacron tai nylon-tikku). Mikäli mahdollista, löydöksen harvinaisuuden vuoksi sekä viranomaisvarmistusta varten, potilaalta otetaan kaksi näytteenottotikkua. Tikut siirretään viruskuljetusputkeen (VTM) ja katkaistaan sinne.

Näytteitä ottavan henkilökunnan suojautumisesta tulee huolehtia erityisen hyvin.

Säilytys ja lähetys Näyte säilytetään ja lähetetään jääkaappilämpötilassa. Näytteenotosta ja näytteenlähetyksestä pyydetään ilmoittamaan välittömästi puh. 045 77349031. Numerossa vastataan joka päivä 24 h.

UN3373-luokiteltu näyte pakataan lähetystä varten pakkausmääräyksen P 650 mukaisesti ja paketissa tulee olla merkinnät "UN3373" sekä "BIOLOGINEN MATERIAALI, KATEGORIA B" ja lisäksi selkeästi merkittynä "INFEKTIOHÄLYTYS - MPXV-epäily" (katso pakkausohje esim. [Postin ohje: laboratorionäytteiden lähettäminen](#), kohdasta "UN 3373 -numerolla luokiteltujen aineiden pakkaaminen").

Menetelmä Reaaliaikainen PCR, joka tunnistaa monkeypox-viruksen eli apinarokon spesifisen kohdegeenin.

Toimitusaika Ennen klo 10 saapuneet näytteet analysoidaan samana päivänä (ma-pe).

Viitearvot Negatiivinen

Tulkinta Positiivinen löydös on erittäin vahva viite apinarokkoinfektiosta. Tulos ilmoitetaan soittamalla.

Konsultointi Taru Meri
Mikrobiologi
p. 044 018 5731
taru.meri@vita.fi

Ilona Uski
Geneetikko
p. 043 201 6554
ilona.uski@vita.fi

Sakari Jokiranta
Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri
p. 050 547 1184
sakari.jokiranta@vita.fi