

-HIVBC-NAT (13765)

VAIN KUDOSLUOVUTTAJIIEN TESTAAMISEEN. Nukleinihapon osoitustutkimus (NAT) HIV-1 ja HIV-2 RNA:n (HIV), hepatiitti B -viruksen DNA:n (HBV) sekä hepatiitti C -viruksen RNA:n (HCV) osoittamiseen plasmanäytteestä.

HUOM! Erikoistutkimus on tarkoitettu ainoastaan kudosluovuttajien infektiöseulontaan kudospalvelulaitoksille. Tätä yhdistelmätestiä ei ole tarkoitettu kliinisen infektion diagnostiikkaan tai poissulkuun.

Indikaatiot Kudosluovuttajien infektiöseulonta (HIV-1, HIV-2, HBV, HCV).

Näyte 2-3 ml EDTA-plasmaa (EDTA-plasmaputki 6ml, Vacuette ref. 456043)

Säilytys ja lähetys Näytteen voi lähettää sentrifugoituna ja eroteltuna erotteluputkeen (Vacuette ref. 459001) tai sentrifugoimattomana EDTA-plasmaputkessa. Näyte säilyy 7 vrk jääkaappilämpötilassa ja 3 vrk huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. Näyte tulee sentrifugoida 3 vrk kuluessa näytteenotosta.

Menetelmä Nukleinihapon monistus (multiplex)

Toimitusaika 2-7 työpäivää

Viitearvot Negatiivinen

Tulkinta Negatiivinen tulos tarkoittaa, että näytteessä ei todettu HIV-RNA:ta, HBV-DNA:ta ja HCV-DNA:ta.

Positiivinen tulos viittaa aktiiviseen HIV, HBV tai HCV -infektioon. Tuloksen lausunnossa mainitaan, minkä taudinaiheuttajan suhteen tulos oli positiivinen.

Tekopaikka SPR Veripalvelu