

S -CodiAb (1253)

Indikaatiot Kurkkumätä -rokotussuojan tarkistaminen ja mahdollisen rokotustarpeen havaitseminen. Tutkimusta voidaan käyttää myös B-soluimmunitetin toimivuuden tutkimiseen.

Näyte 1 ml seerumia tai plasmaa.

Säilytys ja lähetys Säilytys 1-2 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Entsyymi-immunologinen (EIA).

Toimitusaika 4-5 työpäivää.

Viitearvot negatiivinen alle 0,1 IU/ml

Tulkinta Vasta-aineiden pitoisuuden ollessa alle 0,1 IU/ml ei henkilöllä ole riittävää immuunisuojausta ja siten tällöin suositellaan rokotusta, jollei rokotukselle ole vasta-aiheita. Vasta-ainepitoisuuden ollessa 0,1 - 1,0 IU/ml suositellaan uusintarokotetta. Pitoisuuden ollessa yli 1 IU/ml, on vasta-ainemäärä riittävä suojaamaan kliiniseltä infektiolta.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 018 5731
taru.meri@vita.fi