

**S-REUMA-M (13977)**

Reumapaketti, medium, sisältää alla olevat tutkimukset:

Tumavasta-aineet, S ANA (2819)  
Antistreptolysiini, S -AST (1101)  
Reumafaktor fS -RF (3550)  
Sitrulliinipeptidivasta-aineet, S -CCPAb (4744)  
S -DNA, natiivi, vasta-aineet, S -DNAnAb (1261)  
Tuman liukoisten antigeenien vasta-aineet (laaja tutkimus), S -ENAAbL.

S -ENAAbL Tutkimuksessa tehdäännsin seulonta.  
Seulontatuloksen ollessa kohonnut, määritetään lisäksi vasta-aineet seuraaville tuman liukoisille antigeeneille:  
Ribonukleoproteiini, nukleaarinen, vasta-aineet; S -RNPAb (3317)  
Ribonukleoproteiini, 70kDa antigeeni, vasta-aineet; S -RNP70Ab (9117)  
Sm (Smith), vasta-aineet; S -SmAb (3324)  
Sjögrenin syndrooma A (Ro), vasta-aineet; S -SSAAb (3322)  
Sjögrenin syndrooma B (La), vasta-aineet; S -SSBAb (3323)  
Skleroderma 70, vasta-aineet S -Scl70Ab; (3765)  
Sentromeeri (CENP-B); vasta-aineet S -SentAb; (3652)  
Histidyyli-tRNA-syntetaasi, vasta-aineet; S -JolAb (6030)

**Indikaatiot** Immunisairuksien diagnostiikka

**Näyte** 5 ml seerumia

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** S -ANA: epäsuora immunofluoresenssi. S -AST, fS-RF: immunoturbidimetrinen. S -ENAAbL, S -DNAnAb ja S -CCPAb: immunofluorimetrinen

**Toimitusaika** 2-3 työpäivää

**Viitearvot** S -ANA: normaali 400 S -AST: aikuiset

**Tulkinta** Tutkimuksesta annetaan lausunto.

**Konsultointi** Mikrobiologi Taru Meri  
Puh. 044 0185731  
taru.meri@vita.fi