

-UrurNhO (6317)**Indikaatiot** *Ureaplasma urealyticum* infektiopäily.**Näyte** Tikkunäyte (virtsaputki, cervix tai emätin) otetaan pumpuli- tai dacron-tikulla runsasta limaa välttämällä siten, että näytteeseen saadaan epiteelisoluja. Näytetikku voidaan lähettää kuivassa steriilissä tai tehdaspuhtaassa kierrekorkillisessa putkessa tai Copan eNat -putkessa. Ensivirtsanäyte 2-5 tunnin rakkoajan jälkeen. Näytemäärä 5 ml säilöntäaineettomaan virtsankuljetusputkeen.**Säilytys ja lähetys** Näytteiden säilytys jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämpötilassa. Kuivat tikkunäytteet on toimitettava laboratorioon 3 vrk kuluessa, virtsanäytteet 2 vrk kuluessa. Copan eNat -putkessa tikkunäytteet säilyvät tutkimuskelpoisina ainakin viikon ajan.**Menetelmä** Reaaliaikainen PCR**Toimitusaika** 2-5 työpäivää.**Tulkinta** Normaalisti negatiivinen.**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen**Konsultointi** Mikrobiologi Taru Meri
puh. 0440185731
taru.meri@vita.fi