

Sk-PADihot (4184)

Indikaatiot Ihottumat, joiden diagnoosi ei ole selvä kliinisen kuvan perusteella tai eivät reagoi odotetulla tavalla hoitoihin.

Näyte PAD-Ihot tarkoittaa näytettä, joka halutaan ihopatologi-dermatologille tutkittavaksi. Tätä näytepyyntöä tulee käyttää aina silloin, kun kyseessä on ihottuma, kliinisesti ongelmallinen ihomuutos tai esim. Vahva melanoomaepäily.

- Mikäli näyte on lähetetty tavallisena PAD-1-pyyntönä ja lausuva patologi arvioi, että se joudutaan lähettämään vielä alustavan patologin tekemän arvion jälkeen ihopatologille jatkokonsultaatioon, tästä aiheutuu tutkimuksen vastaukselle usein useiden vuorokausien ylimääräinen viive. Ihopatologin konsultaatio voi myös aiheuttaa asiakkaalle lisäkustannuksia ja kalliita jatkotutkimuksia (mm. immunohistokemialliset värjäykset ja muut erikoistutkimukset), joihin laboratorio joutuu pyytämään vielä erikseen asiakkaan hyväksynnän ja joiden valmistuminen saattaa kestää jopa viikkoja.

Näytteet siirretään fiksaationesteeseen (neutraali, puskuroitu 4% formaldehydiliuos eli 10% formaliini) välittömästi. Formaliinia tulisi olla tilavuudeltaan 10 kertaa enemmän kuin kudosta. Näyte lähetetään tiiviisti suljetussa purkissa laboratorioon.

Noin 0,5x1.0cm veneviiltpala tai stanssipala keskeltä hyvin kehittyntä lesiota.

Jos ihottuma on eri puolilla kehoa erilaista, suosittelemme omat näytteet erityyppisistä lesioista.

Rengasmaisista lesioista otetaan näytepala poikittain rengasalueelta. Rakkulataudeissa näytteeksi suositellaan kokonainen rakkula.

Säilytys ja lähetys Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Parafiiniprosessointi, leikkeiden valmistus, He- ja PAS-värjäys ja mikroskopointi

Tulkinta Patologi-dermatologin kirjallinen lausunto

Konsultointi Patologian laboratorio
puh. 09 228800