

As-Syto (4037)

Indikaatiot Vatsaontelon tulehdusdiagnoosi. Vatsaontelon kasvainten diagnoosi.

Näyte Punktioneulalla otetaan 50-200 ml peritoneaalineestettä ennen mahdollista histologista biopsiaa.

Näytteen esikäsittely ennen lähettämistä: näyte sentrifugoidaan matalalla kierrosnopeudella (alle 2000 rpm 10 min). Supernatantti kaadetaan pois ja sedimentin päälle kaadetaan 5-10 ml 50-prosenttista alkoholia

Säilytys ja lähetys Näyteputki pakataan huolellisesti, jotta näyte ei valu kuljetuksessa. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Sytosentrifugointi, Papanicolaoun värjäys, valomikroskopia

Tulkinta Patologian erikoislääkärin antama lausunto.

Konsultointi Patologian laboratorio
puh. 09 228800