

Pf-Syto (4076)

Indikaatiot Pleuran maligniteetin osoittaminen, tulehdusdiagnostiikka.

Näyte Punktioneulalla otetaan 50-200 ml nestettä ennen mahdollista histologista biopsiaa.

Näytteen esikäsittely ennen lähettämistä: näyte sentrifugoidaan matalalla kierrosnopeudella (alle 2000 rpm 10 min). Supernatantti kaadetaan pois ja sedimentin päälle kaadetaan 5-10 ml 50-prosenttista alkoholia

Säilytys ja lähetys Näyteputki pakataan huolellisesti, jotta näyte ei valu kuljetuksessa. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Sytosentrifugointi, Papanicolaoun värjäysmenetelmä, valomikroskopointi.

Tulkinta Patologian erikoislääkärin antama lausunto.

Konsultointi Patologian laboratorio
puh. 09 228800