

P -PLAb (6490)

Sisältää tutkimukset:

P-B2GPAbG (6494), P-KardAbG (6495) ja P-LupusAk (3578)

Indikaatiot Tukostaipumuksen selvittely. Toistuvien keskenmenojen tai sikiökuolemien selvittely

Näyte 3.2 % Na-sitraattiplasma (3 x 2.7 ml)

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy sentrifugoimatta ja erottelematta huoneenlämmössä noin 8 tuntia. Jos näytettä ei voida toimittaa 8 tunnin sisällä, näyte sentrifugoidaan (15 min 2500 g), plasma erotellaan kolmeen muoviputkeen ja lähetetään pakastettuna.

Lähete

[Linkki läheteeseen](#)

Lähetteen esitietokysymyksiin vastattava. Tuloksista annetaan lausunto.

Toimitusaika 1 viikko

Tekopaikka Huslab