

F -Enve-O (2053)**Indikaatiot** *Enterobius vermicularis* (kihomato) -infektioepäily.**Näyte** Näyte otetaan heti aamulla ennen ulostamista ja peseytymistä. Veteen tai keittosuolaan kostutetulla pumpulitikulla hierotaan potilaan perianaali-ihon poimuja melko voimakkaasti ja tikku työnnetään hetkeksi peräaukkoon n. 0.5 cm syvyyteen. Tikku (katkaise tikku tarvittaessa) laitetaan putkeen, jossa on n. 2 ml 0.9% NaCl-liuosta. Suositellaan otettavaksi kolme näytettä parin päivän välein. Formaliiniin sekoitettu ulostenäyte ei sovellu kihomadon munien osoittamiseen.**Säilytys ja lähetys** Näytteen tulee olla laboratoriossa näytteenotosta seuraavana päivänä. Säilytys jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Mikroskopointi.**Toimitusaika** Työpäivinä. Tavanomainen vastausaika 1-2 työpäivää. Näytteen mahdolliset lisätutkimukset voivat pidentää tavanomaista vastausaikaa.**Viitearvot** Negatiivinen**Konsultointi** Mikrobiologian laboratorio
Puh. 045 7734 9039Mikrobiologi Taru Meri
puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi